



Vejledning

Inhalation af luftvejsmedicin – mulige årsager til manglende eller for lille effekt!

Inhalator M = ”seksløber”: (Atrovent og berodual)

- Der er ingen kapsler i.
- Kapslerne i inhalatoren har været åbnet for, i mere end 3 døgn (suger fugt til sig).
- Inhalatoren kan ikke drejes, og de sidste kapsler kan derfor ikke bruges (tromlen blev ikke stillet på tallet 6, da der blev puttet de 6 kapsler i).
- Glemmt at dreje ny kapsel frem førend der perforeres dvs. at allerede tom kapsel bruges igen.
- Glemmt at perforere kapsel ved tryk på knap på siden af Inhalator M.
- Kapsel kan ikke perforeres, fordi ”stikkerne” er blevet for sløve.
- Knappen til at perforere kapslen holdes inde samtidig med at der suges, så hullerne i kapslen er ”fyldt op”.
- Filtret over kapslen er stoppet til.
- Borgeren kan ikke samarbejde om at suge.
- Borgeren har ikke tilstrækkelig sugekraft.
- Borgeren holder tænderne foran mundstykket.
- Borgeren slutter ikke tæt om mundstykket med læberne.
- Borgeren retter sig ikke op, samtidig med at der suges.

Turbohaler: (Bricanyl, Terbasmin, Oxis, Pulmicort, Spirocort, Symbicort)

- Der er ikke drejet ny portion medicin frem. OBS drej både frem og tilbage så det siger klik.
- Turbohaler holdes ikke lodret når ny portion medicin drejes frem.
- Der er kommet fugt i turbohaler (udåndingsluft, rengøring).
- Turbohaler er tom.
- Borgeren kan ikke samarbejde om at suge.
- Borgeren har ikke tilstrækkelig sugekraft.
- Borgeren holder tænderne foran mundstykket.
- Borgeren slutter ikke tæt om mundstykket med læberne.
- Borgeren retter sig ikke op, samtidig med at der suges.



Diskos: (Ventoline, Serevent, Flixotide, Seretide)

- Ikke trykket ny dosis medicin frem.
- Der er kommet fugt i diskosen (udåndingsluft, rengøring).
- Diskosen er tom.
- Borgeren kan ikke samarbejde om at suge.
- Borgeren har ikke tilstrækkelig sugekraft.
- Borgeren holder tænderne foran mundstykket.
- Borgeren slutter ikke tæt om mundstykket med læberne.
- Borgeren retter sig ikke op, samtidig med at der suges.

Handihaler: (Spiriva)

- Ikke puttet ny kapsel i handihaler.
- Kapsel har været ude af sin beskyttende folie for længe og har derfor suget fugt til sig.
- Der er kommet fugt ned gennem mundstykket. Medicinen klistrer derfor fast.
- Borgeren kan ikke samarbejde om at suge.
- Borgeren har ikke tilstrækkelig sugekraft.
- Borgeren holder tænderne foran mundstykket.
- Borgeren slutter ikke tæt om mundstykket med læberne.
- Borgeren retter sig ikke op, samtidig med at der suges.

Respimat: (Spiriva)

- Respimaten er ikke sat rigtig sammen.
- Den lille beholder med medicinen er ikke sat i.
- Respimaten er ikke "pustet igennem" 3 gange efter isættelse af beholderen med medicin.
- Ny portion medicin er ikke drejet frem.
- Respimatens beskyttelseslåg er ikke lukket under fremdrejning af ny portion medicin hvorved dosis er blevet udløst under drejningen af mundstykket.
- Borgeren har ikke gjort klar til en dyb indånding inden medicinen tages.
- Læberne slutter ikke tæt om mundstykket.
- Læberne dækker de to små lufthuller på siderne af mundstykket hvorved der ikke kan åndes ind.
- Tænderne dækker for mundstykket.
- Borgeren suger for kraftigt. Skal bare tage en dyb indånding af ca. samme varighed som udpustningen af medicinen varer.
- Respimaten er tom. Se på siden af denne.
- Borgeren kan ikke samarbejde om at trække vejret ind samtidig med at medicinen udløses.
- Borgeren retter sig ikke op, samtidig med at der åndes ind.

Inhalationsspray uden spacer (Airomir, Atrovent, Berotec, Ventoline, Berodual, Combivent, Serevent, Flixotide, Seretide, Spirocort)

- Inhalatoren med aerosolbeholder er ikke blevet rystet før brug (se på vejledning om den skal rystes).
- Aerosolbeholderen er tom. Skal ved pust mod rude give hvid plamage! Har evt. tæller.
- Borgeren har ikke gjort klar til dyb indånding før udløsning af medicinen.
- Borgeren kan ikke trykke en dosis medicin ud.
- Borgeren lukker ikke tæt om mundstykket med læberne.
- Borgerens tænderne dækker for mundstykket.
- Borgeren kan ikke samarbejde om at trække vejret kraftigt ind samtidigt med at medicinen udløses.

Inhalationsspray med spacer (Airomir, Atrovent, Berotec, Ventoline, Berodual, Combivent, Serevent, Flixotide, Serevent Spirocort)

- Inhalatoren med aerosolbeholder er ikke blevet rystet før brug (se vejledning på medicinen, om den skal rystes før brug).
- Aerosolbeholderen er tom. Skal ved pust mod rude give hvid plamage! Har evt. tæller.
- Borgeren kan ikke trykke en dosis medicin ud.
- Inhalatoren sidder ikke ordentlig fast i spaceren.
- Borgeren kan ikke samarbejde om at trække vejret normalt i spaceren ca. 10 gange pr dosis. (Antal vejrtrækninger gennem spaceren kan nedsættes til 3 – 5 hvis det ikke er muligt for borgeren at klare 10).
- Der udløses flere doser i spaceren inden denne anvendes. Der må kun udløses én dosis medicin i spaceren (aerochamber) hvorefter borgeren skal trække vejret ca. 10 gennem spaceren. Gentages ved ordination på flere doser.
- Borgeren kan ikke anvende mundstykket til spaceren. Sætter tænder for mundstykket eller læberne slutter ikke tæt. Prøv med maske!
- Borgeren anvender maske, men den slutter ikke tæt. Anden størrelse?
- Spaceren er blevet statisk elektrisk hvorved medicinen sætter sig på spacerens inderside. OBS hvorledes spaceren rengøres.