



Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Udarbejdet af sgpl. Anita
Fahlén og Hyg. Sgpl. Birgitte
Sachmann
Godkendt af
Anette Bach Mogensen
Version 2.1

Brug af blærescanner

Gældende fra januar 2024
Rev. senest januar 2027

Formål

At forebygge skader på borgernes blæremuskel grundet ekstention forårsaget af urinretention.

At minimere hyppigheden af SIK og deraf antallet af invasive indgreb.

Indikation

Borgere med symptom på urinretention (manglende vandladning, små hyppige vandladninger, smerter og trykken over symfyen, hyppige UVI, sivende vandladning, nucturi, akut febrilia/konfusion samt på baggrund af anamnese).

Som udgangspunkt anvendes scanneren i akutte situationer, eller når kateter bliver seponeret.

På Hannerup anvendes scanneren ligeledes ved udskrivelse fra sygehuset med SIK ved resturin på mere end 200-300ml.

Kontraindikation

Gravide, P-dialyse borgere samt børn.

Krav til personalet

Primært sygeplejersker, samt SSA hvis der foreligger en lokal instruks herpå i det enkelte distrikt.

Vigtigt

Scannerne virker ikke, hvis de ikke bliver sat til strøm, når de ikke er i brug.

Derfor er det vigtigt at scannerne ikke er ude af strøm i for mange timer. I så fald at scanneren IKKE kan starte (evt. gået tør for strøm), er det vigtigt, at den bliver sat til strøm. Scanneren skal have været under opladning i 6 timer, før den kan nulstilles.

Send altid avis til akutsygeplejen hvis scanneren ikke virker.

Husk at skrive på låneseddel, når I tager den med ud til borgere.

Efter brug skal scanneren både rengøres og desinficeres.

Rengøring og desinfektion af scanneren

Al synlig snavs/gel fjernes med tørt papir, herefter aftørres scannerhovedet med vand/sæbe universalklud. Er håndtaget synligt forurenet, rengøres det også inden det desinficeres. Scanneren må aldrig nedfældes i vand.



Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Udarbejdet af sgpl. Anita
Fahlén og Hyg. Sgpl. Birgitte
Sachmann
Godkendt af
Anette Bach Mogensen
Version 2.1

Brug af blærescanner

Gældende fra januar 2024
Rev. senest januar 2027

Scanneren skal være helt tør inden den desinficeres. Herefter aftørres med desinfektionsklud med alkohol 70-85% til overflader. Start med håndtaget og herefter scannerhovedet.

Fremgangsmåde

- Altid først forsøg om borgeren kan lade vandet af sig selv
- Borgeren lejres fladt på ryggen
- Indstil scanneren til mand eller kvinde (er hun hysterektomeret, scannes hun som mand)
- Der placeres rigeligt (ultralyds) gel over symfyssen (eller på scanningshovedet)
- Hold instrumentet stille mens du scanner
- Hold den på huden med rette tryk, hvis der trykkes for hårdt, vises der et > symbol
- Ved overvægtige borgere, skal du løfte så meget fedstvæv væk som muligt
- Obs at der ikke er luftbobler i gelen

Der scannes altid tre gange, og den højeste værdi, er den man går ud fra.

VIGTIGT. Hvis scanning viser over > 999ml, kontaktes lægen/vagtlægen straks, da der er risiko for polyuri

Litteraturhenviisning

Bladderscan BVI 6100, manual

<https://verathon.com/assets/0900-4830-xx-60.pdf>

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, CEI 1,3 udgave 2018

<https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da>